

TIRNAK BAKIMI



Kullanım Amacı

İneklerin rutin tırnak bakımlarında tırnak küratajlarından sonra kullanılan tahta ya da plastik takozların yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama Şekli

Kürataji ve tuvaleti yapılmış tırnağa silikon tabancası ile takozlar üzerine sıkılması ile tırnaklar üzerine haricen kullanılır.

Kimyasal Özellikleri

Aktif Madde İçeriği

Glycerol polyether

GÖRÜNÜŞ	KOKU	RENGİ	KUTU İÇİ APARATLARI	AMBALAJ	RAF ÖMRÜ
Jel	Karakteristik	Şeffaf	10 adet tahta takoz ve 10 adet kartuş ucu ile tabanca	200 ml	12 ay

Not : Tabanca isteğe bağlı olarak tedarik edilir

Etki Şekli

Hızlı ve yüksek yapıştırma özelliğindedir. Kullanıma hazır olan ürün takoz üzerine uygulandıktan sonra hızlıca kurumaya başlar ve tırnak üzerine tatbik edilen tahta ya da plastik takozun tırnağa sıkıca yapışmasını sağlar. Takozun sağlam tırnağa yapıştırılması kürataji yapılmış olan tırnağın yer ile teması kesilmiş olur ve tırnağın iyileşme süreci hızlanır.

Uygulama Şartları

Tırnak taban bütünlüğü bozulmuş ve topallamaya başlamış olan ineklerde gerekli tırnak kürataji ve yara tuvaleti yapıldıktan sonra kartuş tabancasının sıkılması ile içindeki her iki ürün eşit oranda karışarak tahta takozun üzerine sıkılır ve hiç beklemeden sağlam tırnağa yapıştırılır. Kürataji yapılmış tırnak bandaja alınır ve inek serbest bırakılır. Tahta takozu tırnaktan sökmeye gerek yoktur. Ortalama 4 ila 6 hafta tırnak üzerinde kalan takoz kendiliğinden düşecektir.

Dikkat

Takozun tırnağa uygulama esnasında, hazırlanan pastada ısı artışı gözlemlenebilir. Bu ısı artışının uygulama alanına ve dokulara zararı yoktur. Isı artışı bir kaç dakika içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. Takozun tırnağa uygulama esnasındaki ortam ısı, takozun tırnağa yapışma zamanı ile orantılıdır. Ortam ısı düşüğe takozun tırnağa yapışma zamanında gecikmeye başlar. Bu yüzden soğuk havalarda, takozu tırnağa yaptırdıktan sonra bir ısıtıcı araç ile uygulama alanına ısı uygulaması takoz tırnağa tam anlamı ile yapışmaya kadar yapılabilir.

Uygulayıcı İçin Uyarılar

Kuruyan ve çalışmayan kartuş uçlarını yenileri ile değiştiriniz. Uygulama esnasında solunmaması ve temas edilmemesi gerekir. Solunum yolları ve deri için tahriş edici özelliğindedir. Bu amaçla koruyucu maske ve eldiven kullanınız.